

Sicherheitshinweise



Vor Anwendung Gebrauchsanweisung beachten!

Read the instructions before using the product!

ACHTUNG

- Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten (Überhitzungsrisiko).
- Natur-Moor Kissen NICHT im Grill bzw. NICHT mit der Grillfunktion erwärmen!
- Vor dem Erwärmen/Kühlen des Natur-Moor Kissen, bitte aus der Stoffhülle entnehmen und erst nach der Erwärmung wieder einlegen.
- Nur zur äußeren Anwendung - nicht auf offene Wunden geben.
- Beim Auftreten allergischer Hautreaktionen Verwendung einstellen.
- Bei Moorausritt des Natur-Moor Kissen und / oder Kontakt mit Haut oder Augen sofort mit Wasser ab- bzw. ausspülen und Kissen entsorgen.
- Die Erwärmung des Natur-Moor Kissens darf nur von einem Erwachsenen durchgeführt werden!
- Beachten Sie die angegebene Erwärmungsdauer und Leistung!
- Bitte das Natur-Moor Kissen beim Erwärmen beobachten. Bei Aufblähen des Natur-Moor Kissens den Vorgang sofort abbrechen.

Anschließend nach Abkühlung das Natur-Moor Kissen auf Dichtheit prüfen und eine niedrigere Erwärmungsstufe wählen.

- **ACHTUNG NICHT ÜBERHITZEN** - Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Natur-Moor Kissen aus der Mikrowelle oder dem Wasserbad nehmen. ÜBERHITZUNG KANN DAS NATUR-MOOR KISSEN ZERSTÖREN UND ZU HAUTVERBRENNUNGEN FÜHREN.
- Natur-Moor Kissen in regelmäßigen Abständen kontrollieren, beschädigte oder undichte Natur-Moor Kissen dürfen nicht mehr verwendet werden, diese einfach im Hausmüll entsorgen.
- **ACHTUNG!** Das Natur-Moor Kissen erst wieder erwärmen, wenn das Natur-Moor Kissen Raumtemperatur hat. Das Abkühlen auf Raumtemperatur kann bis zu 2 Stunden dauern.
- **DAS IM NATUR-MOOR KISSEN ENTHALTENE MOOR IST NICHT ZUM VERZEHREN GEEIGNET!**

SICHERHEITSHINWEISE: Verletzungsgefahr!

- Nach dem Erwärmen mit Vorsicht zu handhaben. Die angegebenen Erwärmungs- und Vorkühlzeiten müssen unbedingt eingehalten werden.
- Überhitzung des Natur-Moor Kissens können zu Verbrennungen führen. Bedenken Sie, dass bei längerer Anwendungszeit bereits Temperaturen ab 48°C zu Verbrennungen führen können. Schlagen Sie das Natur-Moor Kissen immer in ein Handtuch ein.
- Bei der Erwärmung kann es zu punktuellen Temperaturschwankungen kommen, kneten Sie daher vor der Anwendung das Natur-Moor Kissen durch und verteilen die Wärme gleichmäßig.
- Kein Spielzeug. Handhabung durch Erwachsene.
- Das Natur-Moor Kissen während der Erwärmung beobachten. Sollte sich das Natur-Moor Kissen aufblähen, ist die Erwärmungstemperatur überschritten. Berühren Sie das Natur-Moor Kissen in dem Fall nicht mit bloßen Händen! Schalten Sie die Mikrowelle oder den Backofen sofort ab und überprüfen Sie das Produkt nach Abkühlung auf Schaden. Bei sichtbaren Schäden, welche u.a. durch Überhitzung, spitze und scharfe Gegenstände oder durch unsachgemäße Stöße (z.B. das Herunterfallen auf den Boden) entstehen können, darf das Kissen nicht mehr angewendet werden! Für etwaige Folgeschäden wird keine Haftung übernommen.
- Bei der Erwärmung im Backofen darf das Natur-Moor Kissen nicht mit heißem Metall in Berührung kommen.
- Das Natur-Moor Kissen nicht aufschneiden, den Inhalt nicht verschlucken.

- Das erwärmte oder gekühlte Natur-Moor Kissen darf nie direkt auf die Haut gelegt werden. Schlagen Sie das Natur-Moor Kissen in ein Handtuch ein.
- Nicht während des Schlafens anwenden.
- Trocken und für Kinder unzugänglich aufbewahren.