

Sicherheitshinweise



Vor Anwendung Gebrauchs-
anweisung beachten!

Read instructions before use!



Kalteanwendungen nicht bei:

- Arteriellen Durchblutungsstörungen und Bluthochdruck
- Hoher Kalteempfindlichkeit
- Schweren systemischen Erkrankungen
- Seltenen Erkrankungen, bei denen Kalteanwendungen zu Schaden führen können wie Kalteagglutininkrankheit, Raynaud Syndrom, Sklerodermie, Vaskulitis oder Cryoglobulinämie
- akuter Blasen- und Nierensymptomatik
- Angina pectoris (relativ)
- Bluthochdruck (relativ)

Warme Anwendungen nicht bei:

- erhöhter Temperatur
- akuter Arthritis
- Gicht
- peripherer arterieller Verschlusskrankheit ab Stadium 3
- erhöhter Blutungsneigung
- Tumorerkrankungen
- dekompensierter Herzinsuffizienz
- fiebrigen Infektionen
- Sensibilitätsstörungen

Weitere Beschränkungen sind bei bestimmungsgemäsem Gebrauch nicht bekannt. Im Zweifelsfall fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

WECHSELWIRKUNGEN MIT ANDEREN MITTELN

Zur Vermeidung von allergischen Hautreaktionen muss die Haut frei von Gelen, Fetten, Salben und ätherischen Ölen sein. **Schmerzmittel und andere Arzneimittel können das Temperaturempfinden beeinträchtigen, die gleichzeitige Einnahme von Schmerzmitteln und anderen Arzneimitteln vor oder während der Wärme- oder Kalteanwendung kann zu Verbrennungen führen.**

NEBENWIRKUNGEN

Bisher keine bekannt. Sollten Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, so informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.

Hinweis: Bei schwerwiegenden Nebenwirkungen informieren Sie bitte den Hersteller oder die Behörde.

Vorsichtsmaßnahmen und besondere Hinweise:

Bei bestimmungsgemäsem Gebrauch sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Was müssen Sie während der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Es gibt keine Hinweise, die gegen die Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit sprechen.

Prüfen Sie vorsichtig mit dem Handrücken, ob das Natur-Moor Kissen an allen Stellen eine angenehme Temperatur erreicht hat (40-43°C). Schlagen Sie das Natur-Moor Kissen vor der Anwendung in ein Handtuch ein.

Anwendung in der Kältherapie:

Vorkühlung im Kuhlenschrank:

Legen Sie das Natur-Moor Kissen für die Kalteanwendung, zeitlich unbegrenzt, in den Kuhlenschrank (ca. 5°C).

Dauerhafte

Lagerung im Kuhlenschrank möglich. Schlagen Sie das Natur-Moor Kissen vor der Anwendung in ein Handtuch

ein.

Hinweis: Bei der Kaltetherapie sollte die Anwendungsdauer von 10 Minuten nicht überschritten werden.

SICHERHEITSHINWEISE:

Verletzungsgefahr!

- Nach dem Erwärmen mit Vorsicht zu handhaben. Die angegebenen Erwärms- und Vorkühlzeiten müssen unbedingt eingehalten werden.
- Überhitzte das Natur-Moor Kissen können zu Verbrennungen führen. Bedenken Sie, dass bei längerer Anwendungszeit bereits Temperaturen ab 48°C zu Verbrennungen führen können. Schlagen Sie das Natur-Moor Kissen immer in ein Handtuch ein.
- Bei der Erwärmsung kann es zu punktuellen Temperaturschwankungen kommen, kneten Sie daher vor der Anwendung das Natur-Moor Kissen durch und verteilen die Wärme gleichmäßig.
- Kein Spielzeug. Handhabung durch Erwachsene.
- Das Natur-Moor Kissen während der Erwärmsung beobachten. Sollte sich das Natur-Moor Kissen aufblähen, ist die Erwärmsungstemperatur überschritten. Berühren Sie das Natur-Moor Kissen in dem Fall nicht mit bloßen Händen! Schalten Sie die Mikrowelle oder den Backofen sofort ab und überprüfen Sie das Produkt nach Abkühlung auf Schaden. Bei sichtbarem Schaden, welche u.a. durch Überhitzung, spitze und scharfe Gegenstände oder durch unsachgemäße Stöße (z.B. das Herunterfallen auf den Boden) entstehen können, darf das Kissen nicht mehr angewendet werden! Für etwaige Folgeschäden wird keine Haftung übernommen.
- Bei der Erwärmsung im Backofen darf das Natur-Moor Kissen nicht mit heißem Metall in Berührung kommen.
- Das Natur-Moor Kissen nicht aufschneiden, den Inhalt nicht verschlucken.
- Das erwärmte oder gekühlte Natur-Moor Kissen darf nie direkt auf die Haut gelegt werden. Schlagen Sie das Natur-Moor Kissen in ein Handtuch ein.
- Nicht während des Schlafens anwenden.
- **Trocken und für Kinder unzugänglich aufbewahren.**

AUFBEWAHRUNG UND PFLEGE

Das Natur-Moor Kissen ist vielfach wiederverwendbar und in Abhängigkeit von Anwendungshäufigkeit, Pflege und Lagerung haltbar. Das Natur-Moor Kissen nach der Benutzung mit einem feuchten Tuch reinigen und trocknen lassen. Keine aggressiven Reiniger und Lösungsmittel verwenden.

Wir empfehlen die Aufbewahrung des Natur-Moor Kissens im Kuhlenschrank oder zusammen mit der Gebrauchsanweisung

trocken und sauber an einem lichtgeschützten Ort.